

## 11) Ortéza kolenní infrapatelární páska – zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.: .....

### Popis výrobku:

Ortéza kolenní infrapatelární páska je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je již základem je pásek třívrstvé textilie v přední části vyztužený plastovou tvarovanou pelotou.

### Použití:

Používá se k fixaci čéšky a řešení afekcí v oblasti čéšky.

### Údržba:

Ortézu je možno omývat ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce,

ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy. Mechanické díly nemažte olejem, ani žádnými rozpouštědly. Doporučujeme pravidelně odstraňovat prach a mechanické nečistoty vně i uvnitř ortézy.

### Aplikace:

Páska se přiloží pod apex čéšky a cirkulárně obepíná horní část lýtka těsně pod kolenem tak, že přitahuje ligamentum patellae a tím mění poměry v patelofemorálním skloubení. Dotahujte tak, aby byl zaručen bezproblémový průchod krve.

### Kontraindikace:

Nejsou známy žádné vedlejší účinky.

U některých pacientů se může vyskytnout alergická reakce na použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.

### Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřípustné, aby na něm byly prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by

*měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)*

*Likvidace zdravotnického prostředku:*  
*Po ukončení jejich používání můžete likvidovat běžným způsobem.*

*Záruka:*

*Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).*

*Záruka se nevztahuje:*

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku*
- užíváním k jinému účelu než je uvedeno v návodu*
- zanedbáním běžné péče o výrobek*
- nesprávným zásahem do výrobku*
- opotřebením obvyklým používáním.*

*Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.*

*Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.*

*Skladování:*

*Ortému uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.*

*Třída rizika: I neměřící, nesterilní*