

## 17) Ortéza hlezenní elastická – zdravotnický prostředek na zakázku

**EV.č.:** .....

### Popis výrobku:

Ortéza hlezenní je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je uzavíratelná na předním díle suchým zipem, je vyrobená z elastického materiálu s mediální a laterální planžetovou výztuhou. Ortéza hlezna je vybavená suchými zipy a tím zpevňuje a fixuje hlezno.

### Použití:

Použití pro těžká nebo středně závažná poranění vnějších vazů kotníku. Doléčování při distorzích, úrazech a operacích.

### Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

### Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které

představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřípustné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))

### Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným

používáním výrobku

- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
  - zanedbáním běžné péče o výrobek
  - nesprávným zásahem do výrobku
  - opotřebením obvyklým používáním.
- Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

### Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

### Aplikace:

Ortézu rozepněte a navlékněte na hlezenní kloub. Za pomoci suchých zipů stáhněte do požadovaného tahu.

### Kontraindikace:

nejsou známy žádné vedlejší účinky  
U některých pacientů se může vyskytnout alergická reakce na použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní

*[Type text]*

*[Type text]*

*[Type text]*

*[Type text]*

*[Type text]*

*[Type text]*