

## 19) Ortéza hlavy zdravotnický prostředek na zakázku

**Ev.č.:** .....

### Popis výrobku:

Ortéza hlavy je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Slouží k fixaci, stabilizaci, korekci, polohování hlavy. Ortéza hlavy je vytvořena z pevného materiálu (plast, laminát), vyměkčená plastazotem a uzavírána pásky na suchý zip.

### Použití:

Slouží k fixaci, stabilizaci, korekci, polohování hlavy. Ortéza hlavy může být nošena ve dne a/nebo v noci, podle pokynů lékaře-specialisty. Lze ji nosit i přímo na těle.

### Aplikace:

Povolit všechny (velcro) pásky před nasazením ortézy podle anatomických bodů. Zlehka přitáhnout pásky. Stáhnout definitivně podle požadovaného držení.

### Údržba:

Ortézu hlavy pravidelně čistěte pomocí houby nebo žínky mýdlovou vodou, poté dobře opláchněte a utřete. Neponořujte celou do vody. ortézu hlavy uchovávejte na místě s běžnou teplotou, a ne v blízkosti silného zdroje tepla. Nikdy nenechávejte ortézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému nárůstu teploty a způsobit

zdeformování pomůcky. Každý den je třeba prohlížet pokožku a je nezbytná každodenní hygiena pacienta.

Doporučujeme pravidelně odstraňovat prach a mechanické nečistoty vně i uvnitř ortézy.

### Kontraindikace:

Pokud se objeví puchýřky, dobře hygienicky ortézu ošetřete a nechte proschnout, což by mělo potlačit případné bakterie. Pokud to nepomůže, spojte se se svým ortotikem.

### Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek a léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky. Kontrolujte pravidelně bandáž a pásky. Pokud jsou opotřebované, musí být vyměněny. V případě obtíží nebo závady na pomůcce se obraťte na ortotika.

### Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcem a příslušnému orgánu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))

### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

### Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

### Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní