

20) Ortéza krční elastická – zdravotnický prostředek na zakázku

EV.č.:

Popis výrobku:

Ortéza krční je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je vyrobená z molitanu, s výztuhou a potažená bavlněným úpletem. Na zadním díle se uzavírá na suchý zip.

Aplikace:

Obtočte límeček kolem krku vykrojením dopředu. Zapněte suchý zip na zadní části za krkem.

Použití:

Používá se při vertebrogenních obtížích, při instabilitě páteře, při hypermobilitách krční páteře, osteoporóze, poúrazových stavech, revmatoidní artritidě tortikolis, spondylolistéze, distorzi krční páteře a akutním poranění měkkých tkání. Zdravotnický prostředek je určen pro případy, kdy je nezbytná fixace a stabilizace páteře.

Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte

agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřijatelné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek na léčebnou funkci a stanový režim nošení pomůcky.

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným

používáním výrobku

- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Třída rizika: I neměřicí, nesterilní