

## 25) Ortéza stabilizační pro sed individuálně zhotovený zdravotnický prostředek

Ev.č.: .....

### Popis výrobku:

Ortéza stabilizační pro sed je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Zajišťuje stabilitu trupu, hlavy a dolních končetin. Sedací část je vybavena abdukčním klínem, který kontroluje polohu dolních končetin při sedu. Trupová část je doplněna zábranami, které zachytí pacienta při úklonu do stran a bezpečně stabilizují trup. Hlavová opěrka je zabudována napevno nebo je stavitelná a stabilizuje polohu hlavy.

### Použití:

Ortéza plní funkci korekční, přičemž zachovává hybnost končetin. Udržuje páteř v požadované poloze, vnitřní klín zajišťuje požadovanou polohu kyčelních kloubů a usazení trupu.

### Ortéza je určena:

-Dětem s DMO  
-Dospělým a dětem s těžkými spastickými projevy na dolních končetinách

-Po operacích kyčelních kloubů, kde je nutné dlouhodobé umístění v klidové pozici  
-Dětem s myopatií (svalovou dysfunkcí)

### Údržba:

Ortéza je vyrobena z aluminiové slitiny, přírodních i syntetických textilií a PUR pěny. Ortéza by měla být uchovávána na místě s běžnou teplotou, a ne v blízkosti silného zdroje tepla. Nikdy neponechávejte ortézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému nárůstu teploty a působit zdeformování pomůcky. Znečištěnou ortézu čistěte pomocí houby a mýdlové vody. Zbytečně nemáchejte. Než začnete opět používat, nechte vyschnout.

### Kontraindikace:

Při nadměrném pocení používejte bavlněné spodní prádlo, které vytvoří savý podklad a zároveň izoluje pokožku od ortézy.

### Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek na

léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky.

Kontrolujte pravidelně polstrování a řemenní. Pokud je opotřebováno, musí být vyměněno. V případě obtíží nebo závady na pomůcce se obraťte na svého ortotika – protetika.

Ortéza je vyráběna individuálně na základě přesného otisku získaného uložením dítěte do speciálního vakuového polštáře. Podle tohoto otisku se ze speciální PUR pěny tvaruje polotovár, který se musí před dohotovením vyzkoušet. Pro pohodlné a co nejdélejší používání se do sedací části zapracovává antidekubitní pěna. Potahový materiál si zvolí zákazník sám podle předloženého vzorníku. Ortéza se upevňuje na individuální vozík všech velikostí, typizovaný dětský kočárek nebo jiný vhodný podvozek. V celém průběhu jsou respektovány požadavky zákazníka. Na přání zákazníka je ortéza upevněna na kolečkovém podstavci. Výše sedu je možné plynule nastavit pomocí páčky na podstavci. Pro jednoduché přemísťování je toto vhodné do interiérového prostředí. Kolečkový podstavec není součástí stabilizační ortézy a je hrazen samostatně bez účasti zdravotních pojišťoven.

Součástí ortézy je fixační vesta se zipem nebo pevné taHy. Tyto doplňky brání nežádoucímu předklonu trupu. Podle potřeby je možné ortézu vybavit hlavovou opěrkou a zádoVý díl nastavitelným polohováním.

Upozornění:

Ortéza se nesmí používat jako zádržný systém pro dítě při přepravě v automobilu (autosedačka). Ortéza není určena pro sport nebo jiné podobné užití ani k řízení nebo spolupráci s jinými zdravotnickými prostředky. Ortézu může používat jen jeden uživatel, pro kterého byla zhotovena. Výrobek je zdravotnickým prostředkem.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v

souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

I. Třídy – neměřící, nesterilní.

Návod ke zdrav. prostředku na zakázku - Ortéza stabilizační pro sed, Protetika Štěpánová a spol., s.r.o., Aktualizace: 1.3.2020, verze 2.0 (na zakázku)

Zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: C 19446

IČO: 26002353, DIČ: CZ26002353, Komerční banka, číslo účtu: 195290160207/0100