

26) Vložky speciální individuální, DFO prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:
Individuální vložky
Jsou na zakázku.

DFOS – jsou stimulační vložky
působící somatosenzoricky.

Použití:
Vložky vkládejte
do obuvi, nejlépe místo stávající
stélky, kterou vyjměte.

Vložky můžete přenášet z obuvi do
obuvi. V případě, že jsou vložky dlouhé,
můžete je zkrátit ve špičce. Zvláštní
pozornost musíte věnovat výběru
obuvi. Obuv by měla být kvalitní,
v patě pevná, nejlépe kožená
a dostatečně volná, aby byl dostatek
prostoru pro vložení ortopedické
vložky a nedošlo k útlaku nohy.

Poučení:
Chodte co nejvíce bosými nohami
po přírodním povrchu – trávě, písku,
oblázcích. Posilujete tím svaly
a korigujete postavení chodidel.

Důležitá je i další péče o nohy –
provádějte střídavé koupele a masáže
chodidel, ale také pravidelnou a
jednoduchou gymnastiku nohou.

Údržba:
Vložky materiálů můžete otírat
mýdlovou vodou, vložky z kůže
roztokem vody
a octa nebo lihem. Nikdy ortopedické
vložky nenamáčejte celé!

Pokud došlo k zapocení nebo
náhodnému namočení vložek v obuvi
vyjměte je a vysušte. Některé krycí kůže
mohou pouštět barvu, obzvláště při
pocení nebo provlhnutí, což je
způsobeno používáním ekologických
barev. Nesušte vložky na teplém zdroji
nebo v jeho bezprostřední blízkosti,

mohlo by dojít k poškození kůže a k
deformaci vložek.

Pro Váš komfort chůze provádějte
pravidelnou pedikúru Vašich nohou.

Vedlejší účinky:
Na vložky, které jsme zhotovili na
základě vyšetření Vašich nohou, si
musíte zvykat postupně. V prvních
dnech používání vložek se doporučuje
časový interval do 30 minut. Postupně
časový interval prodlužujte.

Podle našich zkušeností při postupném
zvykání na vložky je možno celodenně
vložky nosit asi po třech týdnech.

Likvidace:
Po ukončení používání vložek je
můžete zlikvidovat běžným způsobem.

Záruka:
Záruka podle § 2113 zákona č.
89/2012 je poskytována dle platného
OZ. Vady při převzetí podle § 2161

zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku*
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu*
- zanedbáním běžné péče o výrobek*
- nesprávným zásahem do výrobku*
- opotřebením obvyklým používáním.*

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

