

27) Úprava obuvi zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Úprava obuvi je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je určena pro těžší a těžké poškození chodidla a dolní končetiny, v určitých případech mohou nahradit i ortopedickou obuv.

Použití:

Úprava obuvi znamená pevné zabudování stélek, vyztužení svršku a korekční úpravy spodku obuvi, která musí být vhodná k úpravě. Především dostatečně volná ve svršku.

Poučení:

Chod'te co nejvíce bosými nohama po přírodním povrchu – po trávě, písku, oblázcích. Posilujete tím svaly a korigujete postavení chodidel.

Důležitá je i další péče o nohy – provádějte střídavé koupele, masáže chodidel. Pro Váš komfort chůze provádějte pravidelnou pedikúru Vašich nohou.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Údržba:

Zpracovaná korekční tělíška v obuvi ze syntetických materiálů můžete otírat mýdlovou vodou, tělíška z kůže roztokem vody, octa nebo lihem. Nikdy obuv nenamáčejte celou!

Pokud došlo k zapocení nebo náhodnému namočení v obuvi, vysušte ji. Některé krycí kůže mohou pouštět barvu, obzvláště při pocení nebo provlhnutí, což je způsobeno používáním ekologických barev. Nesušte obuv na teplém zdroji nebo v jeho bezprostřední blízkosti, mohlo by dojít k poškození kůže a k deformaci korekčních tělíšek, rozlepení obuvi.

Kontraindikace:

Na úpravu obuvi, kterou jsme zhotovili na základě vyšetření Vašich nohou, si musíte zvykat postupně. V prvních dnech používání se takto upravená obuv doporučuje nosit v časovém intervalu do 30 ti minut. Postupně časový interval prodlužujte. Upravená obuv s korekčními tělísky může vyvolat potíže v místech korekčních opěrných prvků. Tato nepohoda zmizí za několik dní. Pokud přetrvává po jednom týdnu pravidelného nošení, spojte se se svým ošetřujícím lékařem.

Likvidace:

Po ukončení používání upravené obuvi můžete likvidovat běžným způsobem.

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- *na vady způsobené nesprávným používáním výrobku*
- *užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu*
- *zanedbáním běžné péče o výrobek*
- *nesprávným zásahem do výrobku*
- *opotřebení obvyklým používáním.*

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Ortopedická úprava obuvi na míru by neměla být jediným pomocníkem při řešení problému Vašich nohou.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní