

2) Protéza bércová se silikonovým nebo gelovým návlekiem zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Protéza bércová se silikonovým nebo gelovým návlekiem je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Protéza je vyrobená na základě měrného podkladu a sádrového odlitku. Konstrukční provedení protézy se odvíjí od váhy a aktivity uživatele.

Použití:

Tento typ protézy je určen pro amputaci v bérci z důvodu: onemocnění (např. ischemická obliterující choroba DK), úraz (devastace končetiny), deformace, infekce zhoubné nádory, komplikace poruch výživy (diabetes mellitus).

Protéza je určena pro každodenní používání při běžných činnostech, doma i v zaměstnání.

Aplikace:

Při nasazování vnitřního silikonového nebo gelového návleku, věnujte pozornost měkkým tkáním amputované končetiny. Vnitřní silikonový nebo gelový návlek jemně a rovnoměrně narolujte na pahýl. Vyhněte se přílišnému posunutí měkkých tkání. Je důležité, aby se stěny silikonového nebo gelového návleku nekrabatěly a nevytvářely se vzduchové kapsy uvnitř silikonového nebo gelového návleku.

Pokud jste vybaveni silikonovým nebo gelovým návlekiem s pinem, provádějte kontrolu stavu pinu před každým nasazením protézy. Nepoužívejte opotřebované piny nebo piny z předchozího vybavení! Pokud jste vybaveni protézou „na podtlak“ provádějte kontrolu kolenní manžety, zda není přetržená, proražená nebo prasklá!

Pokud máte silikon se silikonovou manžetou, kontrolujte ji denně.

Údržba:

Minimálně jednou denně po sejmutí protézy omyjte silikonový nebo gelový návlek neutrálním mýdlem zevnitř, zvenku teplou tekoucí vodou. Před opětovným nasazením nechte silikonový nebo gelový návlek řádně vyschnout.

Čištění pomůcky se doporučuje provádět na konci dne a protézu ponechat vysušit při pokojové teplotě celou noc.

Nemažte mechanické části olejem ani žádnými rozpouštědly. Doporučuje se pravidelně odstraňovat prach mechanické nečistoty vně i uvnitř protézy.

Nevystavujte pomůcku prostředí s vysokou koncentrací vlhka, předejdete

tak koroznímu napadení některých mechanických částí.

Nechodte s protézou do vody, pokud k tomu nebyla určena. Vaše protetické

vybavení musí být umístěno na suchém a větraném místě.

Nevystavujte intenzivním zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Nikdy nenechávejte vaše vybavení za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému růstu teploty a způsobit zdeformování protézy.

Skladování:

Uchovávejte protézu raději na ležato, její pád by mohl způsobit trhliny nebo deformaci objímky.

Klienti zdravotních pojišťoven, kteří mohou mít dvě funkční vybavení, by měli pravidelně používat i druhou protézu, aby se byli stále jisti, že protéza vyhovuje (zejména vůle pahýlu v lůžku) a může nahradit stávající protézu.

Večer pokožku pahýlu omývejte teplou vodou a neutrálním mýdlem a osušte. Ošetřete výživným krémem.

Před aplikací protézy musí být pahýl dobře osušen a zbaven mastnoty z regeneračních či zklidňujících krémů, které se v průběhu noci nevstřebaly do pokožky.

Kontraindikace:

Během nošení protézy se mohou vyskytnout alergické reakce pokožky na materiály. Zahřívání pahýlu v lůžku následkem nadměrné vůle pahýlu v lůžku. Podráždění, puchýře, otoky na opěrných místech atd.

Ve všech uvedených případech nebo při pocitu zjevného nepohodlí na pahýlu, kontaktujte ihned svého ošetřujícího lékaře.

Kontrola:

Doporučujeme dvakrát ročně kontrolu a seřízení protézy a kontrolu silikonového nebo gelového návleku. Když se vám něco nezdá být v pořádku, neváhejte se spojit se svým protetikem. Protéza je zdravotnickým prostředkem, a tudíž je nepřijatelné, aby na ní prováděla jakékoli zásahy osoba bez příslušné kvalifikace.

Poučení:

Vaše protéza byla sestavena podle vaší váhy a podle činností, které jste nám sdělil. Pokud chcete začít s aktivitami, které by mohly představovat zvýšené zatížení vaší protézy (běh, skoky, nošení břemen) a přitom máte protézu určenou pro chůzi, ověřte si u svého protetika, zda je to možné.

Při změně obuvi za jiný typ vyhledávejte svého protetika, který posoudí nutnost úpravy osy chodidla protézy.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním protézy
- užíváním k jinému účelu než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do protézy
- opotřebení obvyklým používáním.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti. Záruční doba na silikonový návlek je dle výrobce 6 nebo 12 měsíců.

Likvidace:

Protézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou protézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.