

3) Protéza stehenní zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Protéza stehenní je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je vyrobena na základě měrného podkladu a sádrového odlitku. Konstrukční provedení protézy se odvíjí od váhy a aktivity uživatele (trubku, adaptéry, konstrukce chodidla).

Použití:

Tento typ protézy je určen pro amputaci ve stehně z důvodu onemocnění (např. ischemická obliterující choroba DK), úraz (devastace končetiny), deformace, infekce zhoubné nádory, komplikace poruch výživy (diabetes mellitus).

Protéza je určena pro každodenní používání při běžných činnostech, doma i v zaměstnání.

Aplikace:

Při nasazování protézy věnujte pozornost měkkým tkáním amputované končetiny. Vnitřní návlak jemně a rovnoměrně

navlečte na pahýl. Vyhněte se přílišnému posunutí měkkých tkání.

Upozornění:

Aby byla vaše protéza bezpečná, protézu nasazujte pečlivě, jak vás poučil protetik. Pokud je vaše protéza vybavena kolenním kloubem s uzávěrem, musíte se při každém pohybu ze sedu do stoje ujistit o pozici páčky uzamčení kolenního kloubu protézy, jak jste byl poučen svým ortoprotetikem.

Údržba:

Minimálně jednou denně po sejmutí protézy omyjte protézu neutrálním mýdlem zevnitř zvenku vodou. Před opětovným nasazením nechte protézu řádně vyschnout.

Čištění pomůcky se doporučuje provádět na konci dne a protézu ponechat vysušit při pokojové teplotě celou noc.

MECHANICKÉ DÍLY A KONCOVÁ ČÁST:

Nemažte mechanické části olejem ani žádnými rozpouštědly. Doporučuje se pravidelně odstraňovat prach mechanické nečistoty vně i uvnitř protézy.

Skladování:

Nevystavujte pomůcku prostředí s vysokou koncentrací vlhka, předejete tak

koroznímu napadení některých mechanických částí.

Nechodte s protézou do vody, pokud k tomu nebyla určena. Vaše protetické vybavení musí být umístěno na suchém a větraném místě.

Nevystavujte intenzivním zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Nikdy nenechávejte vaše vybavení za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému růstu teploty a způsobit zdeformování protézy.

Uchovávejte protézu raději na ležato, její pád by mohl způsobit trhliny nebo deformaci objímky.

Klienti zdravotních pojišťoven, kteří mohou mít dvě funkční vybavení, by měli pravidelně používat i druhou protézu, aby se byli stále jisti, že pomůcka vyhovuje (zejména vůle pahýlu v lůžku) a může nahradit stávající protézu.

Pokožku pahýlu omývejte teplou vodou a neutrálním mýdlem a osušte. Ošetřete výživným krémem.

Před aplikací protézy musí být pahýl dobře osušen a zbaven mastnoty z regeneračních či zklidňujících krémů, které se v průběhu noci nevstřebaly do pokožky.

Kontraindikace:

Během nošení protézy se mohou vyskytnout alergické reakce pokožky na materiály.

Zahřívání pahýlu v lůžku následkem nadměrné vůle pahýlu v lůžku. Podráždění, puchýře, otoky na opěrných místech atd. Ve všech uvedených případech nebo při pocitu zjevného nepohodlí na pahýlu, kontaktujte ihned svého ortoprotetika.

Kontrola:

Doporučujeme dvakrát ročně kontrolu a seřízení protézy a kontrolu návleku. Když se vám něco nezdá být v pořádku, neváhejte se spojit se svým ortoprotetikem.

Poučení:

Protéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřijatelné, aby byly na ní prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace. Vaše protéza byla sestavena podle vaší váhy a podle činností, které jste nám sdělil. Pokud chcete začít s aktivitami, které by mohly představovat zvýšené zatížení vaší protézy (běh, skoky, nošení břemen) a přitom máte protézu určenou pro chůzi,

ověřte si u svého protetiky, zda je to možné.

Při změně obuvi za jiný typ vyhledávejte svého protetiky, který posoudí nutnost úpravy osy chodidla protézy.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcem a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním protézy
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do protézy

- opotřebení obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Likvidace zdravotnického prostředku:

Protézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou protézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní