

5) Ortéza bederní elastická - zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Ortéza bederní je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je vyrobená z elastického, vysoce prodyšného materiálu se stahujícím a tepelně izolačním efektem na bederní páteř s planžetovými výztuhami. Na zadním díle jsou aplikovány křížové tahy.

Použití:

Používá se u vertebrogenních obtíží při instabilitě a hypermobilitách páteře, osteoporóze, pouřazových stavech a spondylolistéze. Zdravotnický prostředek je určen pro případy, kdy je nezbytná fixace a stabilizace bederní páteře. Velikost pásu určí technik dle tabulky velikostí, který ortézu zároveň vyzkouší a předá pacientovi.

Aplikace:

Ortézu nasad'te kolem pasu, zapněte pomocí suchých zipů v předu na bříše. Křížové tahy vedoucí přes záda zapněte na suché zipy, které jsou na předním díle ortézy.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní

Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebení obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci

a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřijatelné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.