

7) Ortéza trupová Jewett zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Ortéza trupová Jewett je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Tříbodový reklinční rámový korzet z odlehčené kovové konstrukce vyměkčený plastazotem.

Použití:

Tento typ korzetu je určen pro kompresivní zlomeniny hrudně bederního přechodu TH10-L3.

Aplikace:

Korzet je aplikován protetickým technikem, který Vás poučí jak korzet nasazovat. Věnujte pozornost, kde a do jaké výšky budete korzet nasazovat. Zezadu zaháknete na průvlek peloty a uzavřete. Nechodte s ortézou do vody.

Údržba:

Trupovou ortézu čistěte pravidelně pomocí houby nebo žínky mýdlovou vodou, poté dobře opláchněte a utřete. Neponořujte celou do vody.

Každý den je třeba prohlížet pokožku a je nezbytná každodenní hygiena pacienta.

Kontraindikace:

Při nadměrném pocení používejte bavlněné spodní prádlo, které vytvoří savý podklad a zároveň izoluje pokožku od ortézy.

Pokud se objeví puchýřky, dobře hygienicky ortézu ošetřete a nechte proschnout, což by mělo potlačit případné bakterie. Pokud to nepomůže, spojte se se svým ortotikem .

Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek a léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky. Kontrolujte pravidelně polštářování řemení. Pokud jsou opotřebená, musí být vyměněna. V případě obtíží nebo závady na pomůcce se obraťte na ortotika.

Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné.

Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřípustné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek

- *nesprávným zásahem do výrobku*
- *opotřebením obvyklým používáním.*

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní