

## 8) Ortéza hrudní páteře elastická - zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.: .....

### Popis výrobku:

Ortéza hrudní páteře je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je vyrobena z elastického materiálu, s planžetovými výztuhami. Na zadním díle jsou aplikovány křížové tahy.

### Použití:

Používá se u vertebrogenních obtíží při instabilitě a hypermobilitách páteře, osteoporóze, poúrazových stavech a spondylolistéze. Zdravotnický prostředek je určen pro případy, kdy je nezbytná fixace a stabilizace hrudní páteře.

### Aplikace:

Povolte všechny pásky na suché zipy, ortézu nasad'te. Zlehka přitáhněte pásky na suchý zip, stáhněte definitivně podle

požadovaného držení. Ortéza hrudní páteře se nosí ve dne, podle pokynů lékaře specialisty, lze ji nosit přímo na těle. Nechod'te s ortézou do vody.

### Údržba:

Ortézu hrudní páteře můžete prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohly dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu hrudní páteře neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla.

Ortézu skladujeme v pokojové teplotě.

Každý den je třeba prohlížet pokožku a je nezbytná každodenní hygiena pacienta.

### Kontraindikace:

Při nadměrném pocení používejte spodní prádlo, které vytvoří savý podklad a zároveň izoluje pokožku od ortézy hrudní páteře. Pokud se objeví puchýřky dobře hygienicky ortézu ošetřete a nechte

proschnout, což by mělo potlačit případné bakterie.

### Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek na léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky. Kontrolujte pravidelně bandáže a pásky na suchý zip. Pokud jsou opotřebované musí být vyměněny. V případě obtíží nebo závady na pomůcce se obraťte na svého ortotika.

### Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se si uchovat stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého lékaře, zda je to možné.

Ortéza je zdravotnický prostředek proto je nepřípustné, aby byli na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace!

*Nepřikládejte výrobek na otevřené rány.  
Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke  
které došlo v souvislosti s prostředkem, by  
měla být ihned hlášena výrobcí a  
příslušnému orgánu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))*

Záruka:

*Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je  
poskytována dle platného OZ. Vady při  
převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v  
souladu s platným OZ (pokud se vada  
výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od  
jeho převzetí, bere se jako vada, která byla  
již při předání výrobku).*

*Záruka se nevztahuje:*

- na vady způsobené nesprávným  
používáním výrobku*
- užíváním k jinému účelu, než je  
uvedeno v návodu*
- zanedbáním běžné péče o výrobek*
- nesprávným zásahem do výrobku*
- opotřebením obvyklým používáním.*

*Životnost výrobku závisí na způsobu  
a intenzitě používání, správné aplikaci*

*a způsobu ošetřování. Na základě těchto  
vlivů může být životnost kratší než záruční  
doba.*

*Reklamací pomůcky můžete podat v našem  
zařízení, případně na výjezdové pracovišti.*

*Zdravotnický prostředek je určen pouze  
pro konkrétního pacienta.*

Likvidace zdravotnického prostředku:

*Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen  
z používání odevzdejte do sběrného dvora.  
Vyřazenou pomůcku můžete rovněž  
ponechat k likvidaci v našem zařízení.*

*Třída rizika: I neměřicí, nesterilní*