



**PROTETIKA**

ŠTĚPÁN OVÁ a spol., s.r.o.  
nestátní zdravotnické zařízení

Poršova 773, 539 73 SKUTEČ  
Telefon: +420 469 350 162, +420 603 811 344  
E-mail: protetika@seznam.cz  
**www.protetika-stepanova.cz**

## 12) Ortéza kolenní na suchý zip s výztuhou elastická - zdravotnický prostředek na zakázku

**Ev.č.:** .....

### Popis výrobku:

Ortéza kolenní je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je vyrobená z elastického materiálu s boční planžetovou výztuhou, s otvorem pro patelu. Ortéza kolene je vybavená suchými zipy a tím zpevňuje a fixuje koleno.

### Použití:

Používá se u femeropatelární poruchy, chondropatie česky, patelární subluxace, patelo-femorální bandáže – vykloubení, pohmoždění kolene, poranění předního zkrříženého vazy a dalších.

### Aplikace:

Povolte pásky na suchý zip, ortézu nasadíte ze spodní strany kolenního kloubu. Upevněte suchými zipy ve stehenní a bércevé části dolní končetiny.

### Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čistícím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani běhla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

### Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek,

proto je nepřijímatelné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobci a příslušnému orgánu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))

### Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č.



## **PROTETIKA** **ŠTĚPÁNOVÁ a spol., s.r.o.** nestátní zdravotnické zařízení

Pořádková 773, 539 73 SKUTEČ  
Telefon: +420 469 350 162, +420 603 811 344  
E-mail: [protetikaskutec@seznam.cz](mailto:protetikaskutec@seznam.cz)  
**[www.protetika-stepanova.cz](http://www.protetika-stepanova.cz)**

89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

### Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek na léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky.

### Skladování:

Ortézou uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

Třída rizika: I neměřicí, nesterilní

Návod ke zdrav. Prostředku na zakázku- Ortéza kolenní na zakázku- Protetika Štěpánová a spol., s.r.o., Aktualizace: 1.3.2020, verze 2.0 (na zakázku)  
Pořádková 773, 53973 Skuteč, tel.: 469 350 162, 603 811 344, fax: 469 350 162, email: [protetikaskutec@seznam.cz](mailto:protetikaskutec@seznam.cz),  
IČO: 26002353, DIČ: CZ26002353