

## Návod k použití

### Popis výrobku:

Ortéza kolenní návleková, je vyrobena z elastického materiálu s boční planžetovou výztuhou, s otvorem pro patelu. Ortéza kolene je vybavena suchými zipy a tím zpevňuje a fixuje koleno.

### Použití:

Používá se u patelofemorální poruchy, chondropatie česky, patelární subluxace, patelofemorální bandáže - vykloubení, pohmoždění kolena a další.

### Údržba:



Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy

ŠARŽE Č.: .....



## Ortéza kolenní typ 112

### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje: - na vady způsobené nesprávným

používáním výrobku - užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu - zanedbáním běžné péče o výrobek - nesprávným zásahem do výrobku - opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

### Kontraindikace:

Výrobek nesmí být přikládán na otevřené rány.

Nejsou známy žádné vedlejší účinky. U některých pacientů se může vyskytnout alergická reakce na

použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.

### Aplikace:

Povolte pásky na suchý zip, ortézu natáhněte přes kolenní kloub. Stáhněte pásky na suchý zip ve stehenní a bérčové části dolní končetiny.

### Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

### Likvidace zdravotnického prostředku:

Ortézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou ortézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobci ([www.protetikastepanova.cz](http://www.protetikastepanova.cz))

Poršova 773, 539 73 SKUTEČ  
Telefon: +420 469 350 162, +420 603 811 344  
Email: [protetika@protetikastepanova.cz](mailto:protetika@protetikastepanova.cz)

[www.protetika-stepanova.cz](http://www.protetika-stepanova.cz)

a příslušnému orgánu členského státu  
([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))



Návod- Ortéza kolenní typ 112, Vladimíra Štěpánová, Aktualizace  
19.9.2020, verze 1.2