

## 14) Ortéza kolenní zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.: .....

### Popis výrobku:

Ortéza kolenní je zdravotnickým prostředkem na zakázku.

Ortéza dolní končetiny je vytvořena z pevného materiálu (plast, laminát, dlahy, klouby).

### Použití:

Slouží k fixaci, stabilizaci, korekci, polohování nebo odlehčení kolenního kloubu. Zlepšuje porušené funkce.

### Použití:

Povolit všechny (velcro) pásky před nasazením ortézy podle anatomických bodů. Zlehka přitáhnout pásky. Stáhnout definitivně podle požadovaného držení.

Ortéza dolní končetiny může být nošena ve dne a/nebo v noci, podle pokynů lékaře-specialisty. Lze ji nosit i přímo na těle. Nechod'te s ortézou do vody.

### Údržba:

Ortézu dolní končetiny pravidelně čistěte pomocí houby nebo žínky mýdlovou vodou, poté dobře opláchněte a utřete. Neponořujte celou do vody.

Ortéza dolní končetiny by měla být uchovávána na místě s běžnou teplotou a ne v blízkosti silného zdroje tepla. Nikdy nenechávejte ortézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému nárůstu teploty a způsobit zdeformování pomůcky.

Každý den je třeba prohlížet pokožku a je nezbytná každodenní hygiena pacienta. Mechanické díly nemažte olejem, ani žádnými rozpouštědly. Doporučujeme pravidelně odstraňovat prach a mechanické nečistoty vně i uvnitř ortézy.

### Kontraindikace:

Při nadměrném pocení používejte spodní prádlo nebo bavlněnou punčošku, která vytvoří savý podklad a zároveň izoluje pokožku od ortézy.

Pokud se objeví puchýřky, dobře hygienicky ortézu ošetřete mýdlem, vodou a nechte proschnout, což by mělo potlačit případné bakterie. Pokud to nepomůže, spojte se se svým ortotikem .

### Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek a léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky.

Kontrolujte pravidelně bandáž a pásky. Pokud jsou opotřebovány, musí být vyměněny. V případě obtíží nebo závady na pomůcce se obraťte na ortotika.

### Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřípustné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))

### Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od

*jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).*

*Záruka se nevztahuje:*

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku*
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu*
- zanedbáním běžné péče o výrobek*
- nesprávným zásahem do výrobku*
- opotřebení obvyklým používáním.*

*Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.*

*Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.*

*Skladování:*

*Ortézou uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.*

*Třída rizika: I neměřící, nesterilní*