

18) Ortéza hlezenní zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Ortéza hlezenní je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Uzavíratelná na předním díle suchým zipem, je vyrobená z pevného materiálu (plast, laminát, dlahy, klouby). Ortéza hlezna je vybavená suchými zipy a tím zpevňuje a fixuje hlezno.

Použití:

Použití pro těžká nebo středně závažná poranění vnějších vazů kotníku, funkčních při nestabilitách a při pronačním traumatu.

Údržba:

Ortézu pravidelně čistěte pomocí houby nebo žínky mýdlovou vodou, poté dobře opláchněte a utřete. Neponořujte celou do vody. Ortéza by měla být uchovávána na místě s běžnou teplotou, a ne v blízkosti silného zdroje tepla. Nikdy nenechávejte ortézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému nárůstu teploty a způsobit zdeformování pomůcky.

Každý den je třeba prohlížet pokožku

a je nezbytná každodenní hygiena pacienta. Mechanické díly nemažte olejem, ani žádnými rozpouštědly. Doporučujeme pravidelně odstraňovat prach a mechanické nečistoty vně i uvnitř ortézy.

Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřipustné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti. Zdravotnický prostředek je určen pouze pro konkrétního pacienta.

Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

Aplikace:

Ortézu rozepněte a navlékněte na hlezenní kloub. Za pomocí suchých zipů stáhněte do požadovaného tahu.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní