

21) Ortéza horní končetiny zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Ortéza horní končetiny je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Slouží k fixaci, stabilizaci, korekci, polohování nebo odlehčení horní končetiny. Zlepšuje porušené funkce. Ortéza horní končetiny je vytvořena z pevného materiálu (plast, laminát, dlahy, klouby).

Použití:

Ortéza horní končetiny může být nošena ve dne a/nebo v noci, podle pokynů lékaře-specialisty. Lze ji nosit i přímo na těle. Nechod'te s ortézou do vody.

Aplikace:

Povolit všechny (velcro) pásky před nasazením ortézy podle anatomických bodů. Zlehka přitáhnout pásky. Stáhnout definitivně podle požadovaného držení.

Údržba:

Ortézu horní končetiny pravidelně čistěte pomocí houby nebo žínky mýdlovou vodou,

poté dobře opláchněte a utřete. Neponořujte celou do vody.

Ortéza horní končetiny by měla být uchovávána na místě s běžnou teplotou a ne v blízkosti silného zdroje tepla. Nikdy nenechávejte ortézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému nárůstu teploty a způsobit zdeformování pomůcky.

Každý den je třeba prohlížet pokožku a je nezbytná každodenní hygiena pacienta. Mechanické díly nemažte olejem, ani žádnými rozpouštědly. Doporučujeme pravidelně odstraňovat prach a mechanické nečistoty vně i uvnitř ortézy.

Kontraindikace:

Při nadměrném pocení používejte spodní prádlo nebo bavlněnou punčošku, která vytvoří savý podklad a zároveň izoluje pokožku od ortézy.

Pokud se objeví puchýřky, dobře hygienicky ortézu ošetřete a nechte proschnout, což by mělo potlačit případné bakterie. Pokud to nepomůže, spojte se se svým ortotikem.

Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek a léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky.

Kontrolujte pravidelně bandáž a pásky. Pokud jsou opotřebovány, musí být vyměněny. V případě obtíží nebo závady

na pomůcce se obraťte na ortotika.

Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřípustné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí,

bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku*
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu*
- zanedbáním běžné péče o výrobek*
- nesprávným zásahem do výrobku*
- opotřebením obvyklým používáním.*

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Skladování:

Ortému uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní