

## 24) Ortéza pro palec a zápěstí

### zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.: .....

#### Popis výrobku:

Ortéza pro palec a zápěstí je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je vyrobena z elastického materiálu, uzavíratelná na suchý zip v oblasti zápěstí a palce s boční planžetovou výztuhou. Stabilizační účinek je daný provedením.

#### Použití:

Ortéza se používá při imobilizaci zápěstí a palce ruky. Při léčbě akutních a chronických problémů se zápěstím. Vhodná k doléčení po zlomeninách v oblasti zápěstí.

#### Aplikace:

Ortézu rozepněte, vložte palec do rozepnuté ortézy a postupně zapínejte suché zipy.

### elastická -

Zapínejte tak, aby byl zaručen bezproblémový průchod krve.

#### Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

#### Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřípustné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcem a příslušnému orgánu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))

#### Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

#### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

#### Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je

*uvedeno v návodu*  
*- zanedbáním běžné péče o výrobek*  
*- nesprávným zásahem do výrobku*  
*- opotřebením obvyklým používáním.*

*Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.*

*Skladování:*

*Ortému uchovávejte při pokojové teplotě a chráňte před sluncem.*

*Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.*

*Kontraindikace:*

*nejsou známy žádné vedlejší účinky*  
*U některých pacientů se může vyskytnout alergická reakce na použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.*

*Třída rizika: I neměřící, nesterilní*