

29) Protéza horní končetiny – zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Protéza horní končetiny je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Protéza s vnitřním lůžkem z pedilínu nebo silikonu je individuálně vyrobená na základě měrného podkladu a sádrového odlitku. Konstrukční provedení protézy se odvíjí od váhy a aktivity uživatele.

Použití:

Tento typ protézy je určen pro pacienty s amputací horní končetiny z důvodu onemocnění (např. ischemická obliterující choroba), úraz (devastace končetiny), deformace, infekce, zhoubné nádory, komplikace poruch výživy (diabetes mellitus).

Protéza je určena pro každodenní používání při běžných činnostech, doma i v zaměstnání.

Aplikace:

Při nasazování vnitřního lůžka z pedilínu, věnujte pozornost měkkým tkáním amputované končetiny. Vnitřní lůžko jemně a rovnoměrně

natáhněte na pahýl pomocí bavlněné punčochy. Vyhněte se přílišnému posunutí měkkých tkání. Poté zasuňte do pahýlového lůžka.

Při nasazování vnitřního silikonového nebo gelového návleku, věnujte pozornost měkkým tkáním amputované končetiny. Vnitřní silikonový nebo gelový návlek jemně a rovnoměrně narolujte na pahýl. Vyhněte se přílišnému posunutí měkkých tkání. Je důležité, aby se stěny silikonového nebo gelového návleku nekrabatěly a nevytvářely se vzduchové kapsy uvnitř silikonového nebo gelového návleku.

Pokud jste vybaveni silikonovým nebo gelovým návlekiem s pinem, provádějte kontrolu stavu pinu před každým nasazením protézy. Nepoužívejte opotřebované piny nebo piny z předchozího vybavení!

Údržba:

Minimálně jednou denně po sejmutí protézy ošetřete lůžko neutrálním mýdlem zevnitř, zvenku teplou vodou. Před opětovným nasazením nechte lůžko řádně vyschnout.

Punčošky vyměňujte denně.

Nemažte mechanické části olejem

ani žádnými rozpouštědly. Pravidelně odstraňujte prach, mechanické nečistoty vně i uvnitř protézy.

Nevystavujte pomůcku prostředí s vysokou koncentrací vlhka, předejete tak koroznímu napadení některých mechanických částí.

Nechodte s protézou do vody, pokud k tomu nebyla určena. Vaše protéza musí být umístěna na suchém a větraném místě.

Nevystavujte protézu intenzivním zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Nikdy nenechávejte protézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému růstu teploty a způsobit zdeformování protézy.

Večer pokožku pahýlu omývejte teplou vodou a neutrálním mýdlem a osušte. Ošetřete výživným krémem.

Před aplikací vnitřního lůžka musí být pahýl dobře osušen a zbaven mastnoty z regeneračních či zklidňujících krémů, které se v průběhu noci nevstřebaly do pokožky.

Skladování:

Uchovávejte protézu raději na ležato,

její pád by mohl způsobit trhliny nebo deformaci objímky.

Klienti zdravotních pojišťoven, kteří mohou mít dvě funkční protézy, by měli pravidelně používat i druhou protézu, aby si byli stále jisti, že protéza vyhovuje (zejména vůle pahýlu v lůžku) a může nahradit stávající protézu.

Kontraindikace:

Během nošení protézy se mohou vyskytnout alergické reakce pokožky na materiály. Zahřívání pahýlu v lůžku následkem nadměrné vůle pahýlu v lůžku. Podráždění, puchýře, otoky na opěrných místech atd.

Ve všech uvedených případech nebo při pocitu zjevného nepohodlí na pahýlu, kontaktujte ihned svého ošetřujícího lékaře.

Kontrola:

Doporučujeme dvakrát ročně kontrolu a seřízení protézy vnitřního lůžka.

Když se vám něco nezdá být v pořádku, neváhejte se spojit se svým ortoprotetikem. Protéza je zdravotnickým prostředkem, a tudíž

je nepřípustné, aby na ní prováděla jakékoli zásahy osoba bez příslušné kvalifikace.

Poučení:

Vaše protéza byla sestavena podle vaší váhy a podle činnosti, které jste nám sdělil.

Pokud chcete začít s aktivitami, které by mohly představovat zvýšené zatížení vaší protézy (nošení břemen), ověřte si u svého protetiky, zda je to možné.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcem a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku*
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu*
- zanedbáním běžné péče o výrobek*
- nesprávným zásahem do výrobku*
- opotřebením obvyklým používáním.*

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Likvidace zdravotnického prostředku:

Protézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou protézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní