

30) Protéza po amputaci v oblasti nohy – zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Protéza po amputaci v oblasti nohy je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Protéza je vyrobena individuálně na základě měrného podkladu a sádrového odlitku. Konstrukční provedení protézy se odvíjí od váhy a aktivity uživatele.

Použití:

Tento typ protézy je určen pro pacienty s amputací v oblasti nohy z důvodu onemocnění (např. ischemická obliterující choroba DK), úraz (devastace končetiny), deformace, infekce, zhoubné nádory, komplikace poruch výživy (diabetes mellitus).

Protéza je určena pro každodenní používání při běžných činnostech, doma i v zaměstnání.

Aplikace:

Při nasazování věnujte pozornost měkkým tkáním amputované končetiny. Na pahýl natáhněte bavlněnou punčochu. Vyhněte se přílišnému posunutí měkkých tkání. Poté zasuňte do pahýlového lůžka.

Údržba:

Minimálně jednou denně po sejmutí ošetřete protézu neutrálním mýdlem zevnitř, zvenku teplou vodou. Před opětovným nasazením nechte protézu řádně vyschnout.

Punčošky vyměňujte denně.

Pravidelně odstraňujte prach, mechanické nečistoty vně i uvnitř protézy.

Nevystavujte pomůcku prostředí s vysokou koncentrací vlhka.

Nechod'te s protézou do vody, pokud k tomu nebyla určena. Vaše protéza musí být umístěna na suchém a větraném místě.

Nevystavujte protézu intenzivním zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Nikdy nenechávejte protézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému růstu teploty a způsobit zdeformování protézy.

Večer pokožku pahýlu omývejte teplou vodou a neutrálním mýdlem a osušte. Ošetřete výživným krémem.

Před aplikací protézy musí být pahýl dobře osušen a zbaven mastnoty z regeneračních či zklidňujících krémů, které se v průběhu noci nevstřebaly do pokožky.

Skladování:

Uchovávejte protézu raději na ležato, její pád by mohl způsobit trhliny nebo deformaci.

Klienti zdravotních pojišťoven, kteří mohou mít dvě funkční protézy, by měli pravidelně používat i druhou protézu, aby si byli stále jisti, že protéza vyhovuje a může nahradit stávající protézu.

Kontraindikace:

Během nošení protézy se mohou vyskytnout

*alergické reakce pokožky na materiály.
Podráždění, puchýře, otoky na opěrných místech
atd.*

**Ve všech uvedených případech
nebo při pocitu zjevného nepohodlí
na pahýlu, kontaktujte ihned svého
ošetřujícího lékaře nebo svého protetiky.**

Kontrola:

*Doporučujeme dvakrát ročně kontrolu
protézy. Když se vám něco nezdá být v pořádku,
neváhejte se spojit se svým protetikem. Protéza je
zdravotnickým prostředkem, a tudíž
je nepřipustné, aby na ní prováděla jakékoli
zásahy osoba bez příslušné kvalifikace.*

Poučení:

*Vaše protéza byla sestavena podle vaší váhy
a podle činností, které jste nám sdělil.*

*Pokud chcete začít s aktivitami, které by mohly
představovat zvýšené zatížení vaší protézy
(běh, skoky, nošení břemen) a přitom máte
protézu určenou pro chůzi, ověřte si u svého
protetiky, zda je to možné.*

*Při změně obuvi za jiný typ vyhledejte
svého protetiky, který posoudí nutnost
úpravy protézy.*

*Nepřikládejte výrobek na otevřené rány.
Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které
došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být
ihned hlášena výrobcem a příslušnému orgánu
(www.sukl.cz)*

Záruka:

*Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je
poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí
podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s
platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v
průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako
vada, která byla již při předání výrobku).*

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným
používáním výrobku*
- užíváním k jinému účelu, než je
uvedeno v návodu*
- zanedbáním běžné péče o výrobek*
- nesprávným zásahem do výrobku*
- opotřebením obvyklým používáním.*

*Životnost výrobku závisí na způsobu
a intenzitě používání, správné aplikaci
a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů
může být životnost kratší než záruční doba.
Reklamací pomůcky můžete podat v našem
zařízení, případně na výjezdové pracovišti.*

Likvidace zdravotnického prostředku:

*Protézu, která byla vyřazena z používání,
odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou protézu
můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem
zařízení.*

Třída rizika: I neměřící, nesterilní