

4) Protéza stehenní zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Protéza stehenní se silikonovým návlekiem je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Protéza je zhotovená na základě měrného podkladu a sádrového odlitku. Konstrukční provedení protézy se odvíjí od váhy a aktivity uživatele.

Použití:

Tento typ protézy je určen pro pacienty s amputací ve stehně z důvodu onemocnění (např. ischemická obliterující choroba DK), úraz (devastace končetiny), deformace, infekce, zhoubné nádory, komplikace poruch výživy (diabetes mellitus).

Protéza je určena pro každodenní používání při běžných činnostech, doma i v zaměstnání.

Aplikace:

Při nasazování vnitřního silikonového návleku, věnujte pozornost měkkým tkáním amputované končetiny. Vnitřní silikonový návlek jemně a rovnoměrně narolujte na pahýl. Vyhněte se přílišnému posunutí

se silikonovým návlekiem

měkkých tkání. Je důležité, aby se stěny silikonového návleku nekrabatěly a nevytvářely se vzduchové kapsy uvnitř silikonového návleku.

Dbejte na to, aby byl pin silikonového návleku ve správné pozici. Pin zapadne do zámku protézy při jejím zatížení. Při odemykání zámku v pozici v sedu jemně zatlačte na pahýl do lůžka, aby na pin nepůsobil tah. Zatlačte na mechanismus zámku a tím silikonový návlek z protézy uvolněte.

Upozornění:

Aby byla Vaše protéza bezpečná, provádějte kontrolu stavu pinu před každým nasazením protézy. Nepoužívejte opotřebované piny nebo piny z předchozího vybavení. Pokud je Vaše protéza vybavena kolenním kloubem s uzávěrem, musíte se při každém pohybu ze sedu do stoje ujistit o pozici páčky uzamčení kolenního kloubu protézy, jak jste byli poučeni svým protetikem.

Údržba:

Minimálně jednou denně po sejmutí protézy omyjte silikonový návlek neutrálním mýdlem

zevnitř, zvenku vodou. Před opětovným nasazením nechte silikonový návlek řádně vyschnout.

Čištění protézy se doporučuje provádět na konci dne a protézu ponechat vysušit při pokojové teplotě celou noc.

Nemažte mechanické části olejem ani žádnými rozpouštědly. Doporučuje se pravidelně odstraňovat prach mechanické nečistoty vně i uvnitř protézy.

Nevystavujte protézu prostředí s vysokou koncentrací vlhka, předejdete tak koroznímu napadení některých mechanických částí.

Nechod'te s protézou do vody, pokud k tomu nebyla určena. Vaše protéza musí být umístěna na suchém a větraném místě.

Nevystavujte intenzivním zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Nikdy nenechávejte protézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému růstu teploty a způsobit zdeformování protézy.

Uchovávejte protézu raději na ležato, její pád by mohl způsobit trhliny

nebo deformaci objímky.

Klienti zdravotních pojišťoven, kteří mohou mít dvě funkční vybavení, by měli pravidelně používat i druhou protézu, aby si byli stále jisti, že protéza vyhovuje (zejména vůle pahýlu v lůžku) a může nahradit stávající protézu.

Pokožku pahýlu omývejte teplou vodou a neutrálním mýdlem a osušte. Ošetřete výživným krémem.

Před aplikací protézy musí být pahýl dobře osušen a zbaven mastnoty z regeneračních či zklidňujících krémů, které se v průběhu noci nevstřebaly do pokožky.

Ve všech uvedených případech nebo při pocitu zjevného nepohodlí na pahýlu, kontaktujte ihned svého ošetřujícího lékaře.

Kontraindikace:

Během nošení protézy se mohou vyskytnout alergické reakce pokožky na materiály. Zahřívání pahýlu v lůžku následkem nadměrné vůle pahýlu v lůžku. Podráždění, puchýře, otoky na opěrných místech atd.

Kontrola:

Doporučujeme dvakrát ročně kontrolu a seřízení protézy. Kontrolu silikonového návleku. Když se vám něco nezdá být v pořádku, neváhejte se ihned spojit se svým protetikem.

Protéza je zdravotnickým prostředkem, a tudíž je nepřístupné, aby na ní prováděla jakékoli zásahy osoba bez příslušné kvalifikace.

Poučení:

Vaše protéza byla sestavena podle vaší váhy a podle činností, které jste nám sdělil. Pokud chcete začít s aktivitami, které by mohly představovat zvýšené zatížení vaší protézy (běh, skoky, nošení břemen) a přitom máte protézu určenou pro chůzi, ověřte si u svého protetika, zda je to možné.

Při změně obuvi za jiný typ kontaktujte svého protetika, který posoudí nutnost úpravy osy chodidla protézy.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada

výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním protézy
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do protézy
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Likvidace:

Protézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou protézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní