

6) Ortéza trupová – zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Ortéza trupová je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je vyrobena z pevného materiálu (plast, laminát), vyměkčená plastazotem,

Použití:

Ortéza trupová slouží k fixaci, stabilizaci, korekci, polohování a jako podpůrná ortéza trupu.

Kontraindikace:

Při nadměrném pocení používejte bavlněné spodní prádlo, které vytvoří savý podklad a zároveň izoluje pokožku od ortézy.

Pokud se objeví puchýřky, dobře hygienicky ortézu ošetřete mýdlem, vodou a nechte proschnout, což by mělo potlačit případné bakterie. Pokud to nepomůže, spojte se se svým ortotikem.

Aplikace:

1. Před nasazením ortézy povolte všechny (velcro) pásy podle anatomických bodů. 2. Zlehka přitáhněte pásy. 3. Stáhněte definitivně podle požadované fixace.

Ortéza trupová může být nošena ve dne nebo v noci, podle pokynů lékaře-specialisty. Lze ji nosit i přímo na těle.

Údržba:

Ortézu trupovou pravidelně čistěte pomocí houby nebo žínky mýdlovou vodou, poté dobře opláchněte a utřete. Neponořujte celou do vody.

Ortéza trupová by měla být uchovávána na místě s běžnou teplotou a ne v blízkosti silného zdroje tepla. Nikdy nenechávejte ortézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému nárůstu teploty a způsobit zdeformování pomůcky.

Každý den je třeba prohlížet pokožku a je nezbytná každodenní hygiena pacienta.

Mechanické díly nemažte olejem, ani žádnými rozpouštědly. Doporučujeme pravidelně odstraňovat prach

a mechanické nečistoty vně i uvnitř ortézy. Nechodte s ortézou do vody.

Skladování:

Ortézu trupovou uchovávejte při pokojové teplotě, chraňte před sluncem a zdroji silného tepla.

Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek na léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky.

Kontrolujte pravidelně bandáž a pásy. Pokud jsou opotřebené, musí být vyměněny. V případě obtíží nebo závady na pomůcce se obraťte na ortotika.

Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné.

Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřípustné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace!

*Nepřikládejte výrobek na otevřené rány.
Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke
které došlo v souvislosti s prostředkem, by
měla být ihned hlášena výrobcí a
příslušnému orgánu (www.sukl.cz)*

Záruka:

*Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je
poskytována dle platného OZ. Vady při
převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v
souladu s platným OZ (pokud se vada
výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od
jeho převzetí, bere se jako vada, která byla
již při předání výrobku).*

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným
používáním výrobku*
- užíváním k jinému účelu, než je
uvedeno v návodu*
- zanedbáním běžné péče o výrobek*
- nesprávným zásahem do výrobku*
- opotřebením obvyklým používáním.*

*Životnost výrobku závisí na způsobu
a intenzitě používání, správné aplikaci*

*a způsobu ošetřování. Na základě těchto
vlivů může být životnost kratší než záruční
doba.*

*Reklamací pomůcky můžete podat v našem
zařízení, případně na výjezdové pracovišti.*

*Zdravotnický prostředek je určen pouze
pro konkrétního pacienta.*

Likvidace zdravotnického prostředku:

*Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen
z používání, odevzdejte do sběrného dvora.
Vyřazenou pomůcku můžete rovněž
ponechat k likvidaci v našem zařízení.*

Třída rizika: I neměřící, nesterilní