

Návod k použití

Popis výrobku:

Ortéza bederní, je vyrobena z elastického materiálu, s planžetovými výtuhami. Na zadním díle jsou aplikovány křížové tahy a pelota.

Použití:

Zdravotnický prostředek se používá u vertebrogenních obtíží, při instabilitě páteře a hypermobilitách páteře, při osteoporóze, pourazových stavech a spondylolistéze. Zdravotnický prostředek je určen pro případy, kdy je nezbytná fixace a stabilizace bederní páteře. Velikost pásu určí technik dle tabulky velikostí, který ortézu zároveň vyzkouší a předá pacientovi.

Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.



ŠARŽE Č.:

Ortéza bederní ŠTĚP typ 404

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Kontraindikace:

Výrobek nesmí být přikládán na otevřené rány.

Nejsou známy žádné vedlejší účinky. U některých pacientů se může vyskytnout alergická reakce na použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.

Aplikace:

Ortézu nasadíte kolem pasu, zapnete pomocí suchých zipů v předu na břiše. Křížové tahy vedoucí přes záda zapnete na suché zipy, které jsou na předním díle ortézy.

Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chráňte před sluncem.

Likvidace zdravotnického prostředku:

Ortézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou ortézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobci (www.protetika-stepanova.cz) a příslušnému orgánu členského státu (www.sukl.cz)

