

## Návod k použití

### Popis výrobku:

Ortéza bederní, je vyrobena z elastického materiálu, s planžetovými výztuhami. Na zadním díle jsou aplikovány křížové tahy a pelota.

### Použití:

Zdravotnický prostředek se používá u vertebrogenních obtíží, při instabilitě páteře a hypermobilitách páteře, při osteoporóze, pourazových stavech a spondylolistéze. Zdravotnický prostředek je určen pro případy, kdy je nezbytná fixace a stabilizace bederní páteře.

### Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

ŠARŽE Č.: .....



## **Ortéza bederní vysoká typ 406**

### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

### Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

### Kontraindikace:

Výrobek nesmí být přikládán na otevřené rány.

Nejsou známy žádné vedlejší účinky. U některých pacientů se může vyskytnout alergická reakce na použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.

### Aplikace:

Ortézu nasadíte kolem pasu, zapnete pomocí suchých zipů v předu na břiše. Křížové tahy vedoucí přes záda zapnete na suché zipy, které jsou na předním díle ortézy.

### Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

### Likvidace zdravotnického prostředku:

Ortézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou ortézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcem ([www.protetika-stepanova.cz](http://www.protetika-stepanova.cz)) a příslušnému orgánu členského státu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))

