

Návod k použití

Popis výrobku:

Ortéza kolenní návleková je vyrobena z elastického materiálu s dvouosými kolenními klouby, s otvorem pro patelu. Ortéza kolene je vybavená suchými zipy a tím zpevňuje a fixuje koleno.

Použití:

Používá se u patelofemorální poruchy, chondropatie česky, patelární subluxace, patelofemorální bandáže - vykloubení, pohmoždění kolena a další.

Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čistícím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

ŠARŽE Č.:



Ortéza kolenní typ 115

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Kontraindikace:

Výrobek nesmí být přikládán na otevřené rány.

Nejsou známy žádné vedlejší účinky. U některých pacientů se může vyskytnout

alergická reakce na použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.

Aplikace:

Povolte pásky na suchý zip, ortézu navlékněte přes kolenní kloub. Stáhněte pásky na suchý zip ve stehenní a bérkové části dolní končetiny.

Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chráňte před sluncem.

Likvidace zdravotnického prostředku:

Ortézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou ortézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí (www.protetika-stepanova.cz) a příslušnému orgánu členského státu (www.sukl.cz)

