

## Návod k použití

### Popis výrobku:

Ortéza krční, je vyrobena z molitanu je s výztuhou a potažená bavlněným úpletem. Na zadním díle se uzavírá na suchý zip.

### Použití:

Zdravotnický prostředek se používá u vertebrogenních obtíží, při instabilitě páteře a hypermobilitách páteře, při osteoporóze, pourazových stavech a spondylolistéze. Zdravotnický prostředek je určen pro případy, kdy je nezbytná fixace a stabilizace krční páteře.

### Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

**ŠARŽE Č.:** .....



## **Ortéza krční typ 402**

### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

### Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamací pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

### Kontraindikace:

Výrobek nesmí být přikládán na otevřené rány.

Nejsou známy žádné vedlejší účinky. U některých pacientů se může vyskytnout alergická reakce na

použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.

### Aplikace:

Obtočte límeček kolem krku vykrojením dopředu. Zapněte suchý zip, na zadní části za krkem.

### Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

### Likvidace zdravotnického prostředku:

Ortézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou ortézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí ([www.protetika-stepanova.cz](http://www.protetika-stepanova.cz)) a příslušnému orgánu členského státu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))

