



PROTETIKA

ŠTĚPÁNOVÁ a spol., s.r.o.
nestátní zdravotnické zařízení

Poršova 773, 539 73 SKUTEČ
Telefon: +420 469 350 162, +420 603 811 344
E-mail: protetikaskutec@seznam.cz

www.protetika-stepanova.cz

12) Ortéza kolenní na suchý zip s výztuhou elastická - zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Ortéza kolenní je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Je vyrobená z elastického materiálu s boční planžetovou výztuhou, s otvorem pro patelu. Ortéza kolene je vybavená suchými zipy a tím zpevňuje a fixuje koleno.

Použití:

Používá se u femeropatelní poruchy, chondropatie česky, patelní subluxace, patelo-femorální bandáže - vykloubení, pohmoždění kolene, poranění předního zkříženého vazy a dalších.

Aplikace:

Povolte pásky na suchý zip, ortézu nasad'te ze spodní strany kolenního kloubu. Upevněte suchými zipy ve stehenní a bérkové části dolní končetiny.

Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné. Ortéza je zdravotnický prostředek,

proto je nepřípustné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcí a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č.



PROTETIKA

ŠTĚPÁNOVÁ a spol., s.r.o.
nestátní zdravotnické zařízení

Poršova 773, 539 73 SKUTEČ
Telefon: +420 469 350 162, +420 603 811 344
E-mail: protetikaskutec@seznam.cz

www.protetika-stepanova.cz

89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek na léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky.

Skladování:

Ortému uchovávejte při pokojové teplotě a chráňte před sluncem.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní