



PROTETIKA

ŠTĚPÁNOVÁ a spol., s.r.o.
nestátní zdravotnické zařízení

Poršova 773, 539 73 SKUTEČ
Telefon: +420 469 350 162, +420 603 811 344
E-mail: protetikaskutec@seznam.cz

www.protetika-stepanova.cz

16) Ortéza dolní končetiny Zdravotnický prostředek na zakázku

Ev.č.:

Popis výrobku:

Ortéza dolní končetiny je zdravotnickým prostředkem na zakázku. Slouží k fixaci, stabilizaci, korekci, polohování nebo odlehčení dolní končetiny. Zlepšuje porušené funkce. Ortéza dolní končetiny je vytvořena z pevného materiálu (plast, laminát, dlahy, klouby).

Použití:

Ortéza dolní končetiny může být nošena ve dne a/noči, podle pokynů lékaře-specialisty. Lze ji nosit i přímo na těle. Nechodte s ortézou do vody.

Aplikace:

Povolit všechny (velcro) pásky před nasazením ortézy podle anatomických bodů. Zlehka přitáhnout pásky. Stáhnout definitivně podle požadovaného držení.

Údržba:

Ortézu dolní končetiny pravidelně čistěte pomocí houby nebo žínky mýdlovou vodou, poté dobře opláchněte a utřete. Neponořujte celou do vody.

Ortéza dolní končetiny by měla být uchovávána na místě s běžnou teplotou a ne v blízkosti silného zdroje tepla. Nikdy nenechávejte ortézu za oknem nebo za skly automobilu. Sluneční záření může vést k značnému nárůstu teploty a způsobit zdeformování pomůcky.

Každý den je třeba prohlížet pokožku a je nezbytná každodenní hygiena pacienta. Mechanické díly nemažte olejem, ani žádnými rozpouštědly. Doporučujeme pravidelně odstraňovat prach a mechanické nečistoty vně i uvnitř ortézy.

Kontraindikace:

Při nadměrném pocení používejte spodní prádlo nebo bavlněnou punčošku, která vytvoří savý podklad a zároveň izoluje pokožku od ortézy. Pokud se objeví puchýřky, dobře hygienicky ortézu ošetřete mýdlem, vodou a nechte proschnout, což by mělo potlačit případné bakterie. Pokud to nepomůže, spojte se se svým ortotikem.

Kontrola:

Po převzetí zdravotnického prostředku navštivte svého odborného lékaře, který si ověří, zda byl splněn jeho požadavek a léčebnou funkci a stanoví režim nošení pomůcky.

Kontrolujte pravidelně bandáž a pásky. Pokud jsou opotřebené, musí být vyměněny. V případě obtíží nebo závady na pomůcce se obraťte na ortotika.

Poučení:

Pomůcka byla sestavena Vám na míru. Snažte se uchovat si stálou váhu. Pokud chcete začít s aktivitami, které představují zvýšené zatížení, ověřte si u svého ortotika, zda je to možné.

Ortéza je zdravotnický prostředek, proto je nepřípustné, aby byly na něm prováděny zásahy osobou bez příslušné kvalifikace.

Nepřikládejte výrobek na otevřené rány. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobcem a příslušnému orgánu (www.sukl.cz)

Likvidace zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek, který byl vyřazen z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou pomůcku můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od

Návod ke zdrav. prostředku na zakázku- Ortéza dolní končetiny, Protetika Štěpánová a spol., s.r.o., Aktualizace: 1.3.2020, verze 2.0 (na zakázku)

Poršova 773, 53973 Skuteč, tel.: 469 350 162, 603 811 344, fax: 469 350 162, email: protetikaskutec@seznam.cz

<https://www.protetika-stepanova.cz>, IČO: 26002353, DIČ: CZ26002353



PROTETIKA

ŠTĚPÁNOVÁ a spol., s.r.o.
nestátní zdravotnické zařízení

Poršova 773, 539 73 SKUTEČ
Telefon: +420 469 350 162, +420 603 811 344
E-mail: protetikaskutec@seznam.cz

www.protetika-stepanova.cz

jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávným používáním výrobku
- užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu
- zanedbáním běžné péče o výrobek
- nesprávným zásahem do výrobku
- opotřebení obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

Skladování:

Ortému uchovávejte při pokojové teplotě a chráňte před sluncem.

Třída rizika: I neměřící, nesterilní

Návod ke zdrav. prostředku na zakázku- Ortéza dolní končetiny, Protetika Štěpánová a spol., s.r.o., Aktualizace: 1.3.2020, verze 2.0 (na zakázku)

Zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: C 19446

IČO: 26002353, DIČ: CZ26002353, Komerční banka, číslo účtu: 195290160207/0100