

Nejsou známy žádné vedlejší účinky. U některých

## Návod k použití

### Popis výrobku:

Ortéza hlezenní uzavíratelná na předním díle suchým zipem, je vyrobena z elastického materiálu s mediální a laterální planžetovou výztuhou. Ortéza hlezna je vybavena suchými zipy a tím zpevňuje a fixuje hleznu.

### Použití:

Použití pro těžká nebo středně závažná poranění vnějších vazů kotníku. Doléčování při distorzích, úrazech a operacích.

### Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

**ŠARŽE Č.:** .....



Návod - Ortéza hlezenní typ 201, Vladimíra Štěpánová, Aktualizace  
19.9.2020, verze 1.2

## **Ortéza hlezenní typ 201**

### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje: - na vady způsobené nesprávným používáním výrobku - užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu - zanedbáním běžné péče o výrobek - nesprávným zásahem do výrobku - opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba.

Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

### Kontraindikace:

Výrobek nesmí být přikládán na otevřené rány. Pacientů se může vyskytnout alergická reakce na

použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.

### Aplikace:

Ortézu rozepněte, navlékněte na hlezenní kloub. Za pomoci suchých zipů stáhněte do požadovaného tahu.

### Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

Likvidace zdravotnického prostředku: Ortézu, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou ortézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobci ([www.protetikastepanova.cz](http://www.protetikastepanova.cz)) a příslušnému orgánu členského státu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))

