

## Návod k použití

### Popis výrobku:

Ortéza je vyrobena z plastové tvarovatelné peloty na suchý zip, bandážovaná plastazotem.

### Použití:

Používá se jako aktivní bandáž působící při bolestech kolenního kloubu v důsledku přetížení patelárního vazů.

### Údržba:

Ortézu je možno prát ve vlažné vodě jemným čisticím prostředkem. Pečlivě odstraňte veškeré zbytky mýdla, které by mohlo dráždit kůži. Nechte volně uschnout na vzduchu. Ortézu neperte v pračce. Nesušte v sušičce, ani poblíž tepelného zdroje. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani bělidla. Na výrobku neprovádějte neodborné úpravy.

ŠARŽE Č.: .....



## **Ortéza kolenní infrapatelární páska typ 121**

### Záruka:

Záruka podle § 2113 zákona č. 89/2012 je poskytována dle platného OZ. Vady při převzetí podle § 2161 zákona č. 89/2012 v souladu s platným OZ (pokud se vada výrobku projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, bere se jako vada, která byla již při předání výrobku).

Záruka se nevztahuje: - na vady způsobené nesprávným používáním výrobku - užíváním k jinému účelu, než je uvedeno v návodu - zanedbáním běžné péče o výrobek - nesprávným zásahem do výrobku - opotřebením obvyklým používáním.

Životnost výrobku závisí na způsobu a intenzitě používání, správné aplikaci a způsobu ošetřování. Na základě těchto vlivů může být životnost kratší než záruční doba. Reklamaci pomůcky můžete podat v našem zařízení, případně na výjezdové pracovišti.

### Kontraindikace:

Výrobek nesmí být přikládán na otevřené rány.

Nejsou známy žádné vedlejší účinky. U některých pacientů se může vyskytnout alergická reakce na použitý materiál, v takovém případě se obraťte na odborného lékaře.

### Aplikace:

Suchý zip na pásce rozepněte pelotu umístěte pod česku a stáhněte suchý zip. Dotahujte tak, aby byl zaručen bezproblémový průchod krve.

### Skladování:

Ortézu uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte před sluncem.

Likvidace zdravotnického prostředku:

Ortému, která byla vyřazena z používání, odevzdejte do sběrného dvora. Vyřazenou ortézu můžete rovněž ponechat k likvidaci v našem zařízení.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být ihned hlášena výrobci ([www.protetikastepanova.cz](http://www.protetikastepanova.cz)) a příslušnému orgánu členského státu ([www.sukl.cz](http://www.sukl.cz))



Návod- Ortéza kolenní infrapatelární páska typ 121, Vladimíra Štěpánová, Aktualizace 19.9.2020, verze 1.2